

Gebrauchsanweisung

NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest
zur Eigenanwendung | Nur zu Anwendung außerhalb des Körpers

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Test-Karte ersetzt nicht diese allgemeine Gebrauchsanweisung.

- NASOCHECKcomfort** ist ein SARS-CoV-2-Antigen-Test, der auf einem Abstrich im **vorderen Nasenhöhlen-Bereich** basiert.

Dieser Test ermöglicht den Nachweis von Antigenen (körperfremde Eiweiße, gegen die das Immunsystem Antikörper bildet) auf das SARS-CoV-2-Virus in den Abstrich-Probe. Damit kann eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen werden.¹

- Der Test sollte bei **Tageslicht** oder an einem durch **eine Lichtquelle ausreichend beleuchteten Ort** durchgeführt werden.
- Zusätzlich zum Lieferumfang benötigen Sie **eine Uhr oder einen Timer**.

WICHTIGE HINWEISE BEI DER EIGENANWENDUNG:

Der Test darf **von volljährigen Personen** in Eigenanwendung durchgeführt werden.

Im Falle eines positiven Testergebnisses wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt oder außerhalb der Sprechzeiten an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 und folgen Sie den weiteren Anweisungen. Dies ist notwendig, da das positive Ergebnis des Tests durch einen PCR-Test überprüft werden muss.

Die Möglichkeit einer Infektion kann **auch bei negativem Testergebnis** nicht **ausgeschlossen werden**, da eine niedrige Viruslast oder der Fehler bei der Probenentnahme zu einem falschen Ergebnis führen können!

Halten Sie sich auch **bei negativem Testergebnis weiterhin an die geltenden Vorschriften zur Pandemiebekämpfung und Hygienemaßnahmen**, da das Ergebnis des Tests lediglich eine Momentaufnahme des Gesundheitszustandes darstellt.




Sollten Sie während oder unmittelbar nach dem Test Nasenbluten bekommen oder Schmerzen aufgrund der Probenentnahme haben, **wenden Sie sich bitte an einen Arzt**.

Nach der Verwendung verpacken Sie alle Teile des Schnelltests in einem leeren Müllbeutel, verschließen Sie diesen gründlich und entsorgen Sie diesen anschließend über den Haushmüll.


LAGERBEDINGUNGEN UND HALTBARKEIT:

	Haltbarkeit: 12 Monate (siehe Aufdruck Testkarte)	4°C bis 30°C	bei 4°C bis 30°C lagern
	Vor Sonnenlicht schützen		Trocken lagern
	Unzugänglich für Kinder aufbewahren		

WEITER BEI SCHritt 4

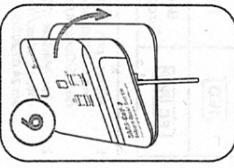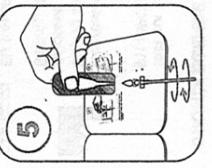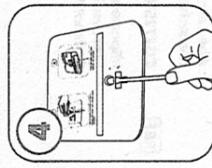

LIEFERUMFANG:

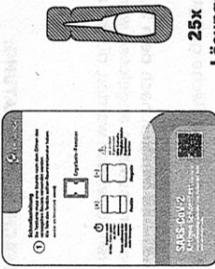

25 x Testkarte (im versiegelten Beutel)

25 x Lösungsfäschchen



25 x Trocknungsmittel
(im versiegelten Beutel,
bitte im Restmüll entsorgen)



25 x Tupfer


diese Anleitung

TESTDURCHFÜHRUNG:

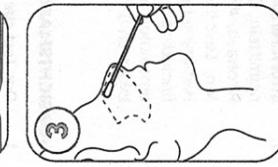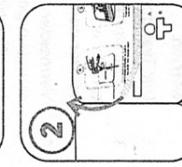


ERGEBNIS ABLESEN:

POSITIV (+):

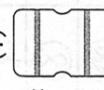

Ergebnis nach 15 Minuten (nicht später als 20 Minuten) auf der Vorderseite der geschlossenen Karte im Ergebnis-Fenster ablesen.

NEGATIV (-):

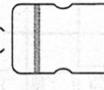


Ergebnis nach 15 Minuten (nicht später als 20 Minuten) auf der Vorderseite der geschlossenen Karte im Ergebnis-Fenster ablesen.

- Karte schließen, mit **Klebestreifen K zusammendrücken**.
- menkleben & vorsichtig zusammenpressen.**
- Karte während der Wartezeit nicht mehr **bewegen!**

UNGÜLTIG:

Es gibt keinen roten Streifen im Qualitätskontrollbereich (C), oder es gibt einen blauen Streifen im Qualitätskontrollbereich (C). Dies kann auf einen Fehler bei der Durchführung des Testes oder einen abgelaufenen Test hindeuten.

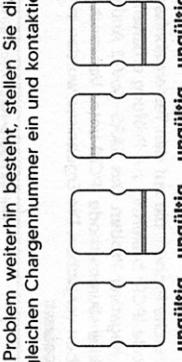

- 25 x Testkarte (im versiegelten Beutel)**
- 25 x Lösungsfäschchen**
- 25 x Trocknungsmittel**

1 Test

1 Test